

検査内容変更のご案内

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り、誠に有り難く厚くお礼申し上げます。

この度、心不全の診断および病態把握に有用なマーカーである「脳性Na利尿ペプチド前駆体N末端フラグメント（NT-Pro BNP）」を内部検査とすることになりました。

つきましては、下記のとおり検査内容の変更をさせていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。今後とも当検査センターをご利用くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

- 受託開始日：令和2年10月19日（月） 受付分より

- 受託開始項目

項目コード：1455

項目名：脳性Na利尿ペプチド前駆体N末端フラグメント（NT-Pro BNP）

- 変更内容および検査要項

	新	現行
検査項目名	NT-Pro BNP	同左
項目コード	1455	同左
検査材料	血清(または血漿) 0.5mL	同左
採血容器	AO 汎用血液真空採血管(分離剤入り) または EO (EDTA 採血管)	同左
保存条件	冷蔵	同左
測定方法	CLIA 法	ECLIA 法
基準値	125 pg/mL以下	同左
報告日数	2～3日	2～4日
保険点数料/判断料	136点/144点 [生化学的検査(Ⅱ)]	同左
区分	D008-19	同左


※ なお、ご不明な点がございましたら下記にご連絡ください。

(担当：検査課 中田、山口 検査室 直通電話番号076-239-3832)


【同時再現性】

	L	M	H
1	138.8	469.1	4316.8
2	147.2	434.0	4395.4
3	142.6	440.2	4277.8
4	144.0	450.2	4410.8
5	137.3	454.5	4353.8
6	144.4	463.9	4485.2
7	142.7	469.0	4547.1
8	139.7	466.7	4512.6
9	138.6	439.4	4579.8
10	140.0	464.2	4477.9
平均	141.53	455.12	4435.72
最大値	147.2	469.1	4579.8
最小値	137.3	434.0	4277.8
レンジ	9.9	35.1	302.0
SD	3.14	13.43	100.74
CV (%)	2.22	2.95	2.27


【相関図1】

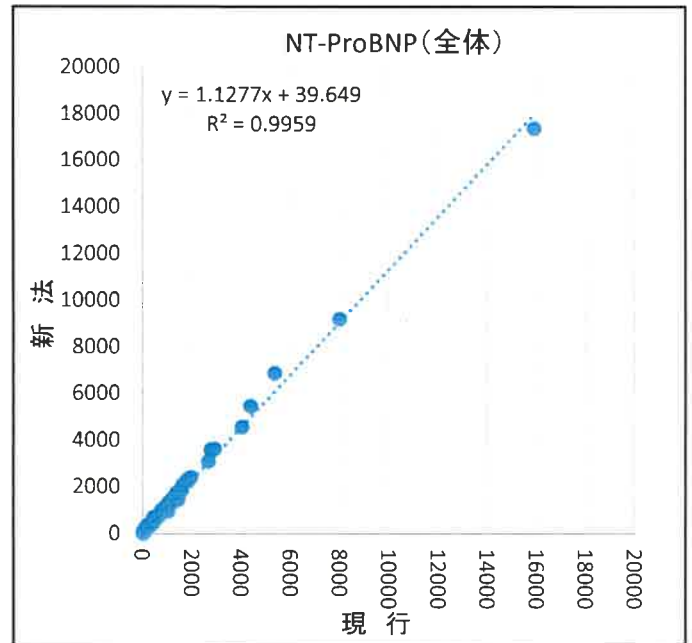

【相関図2】

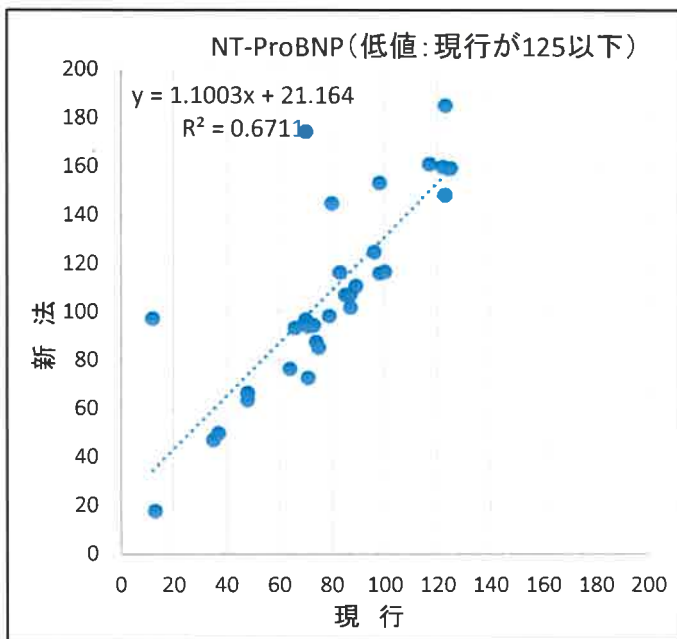

【相関図3】

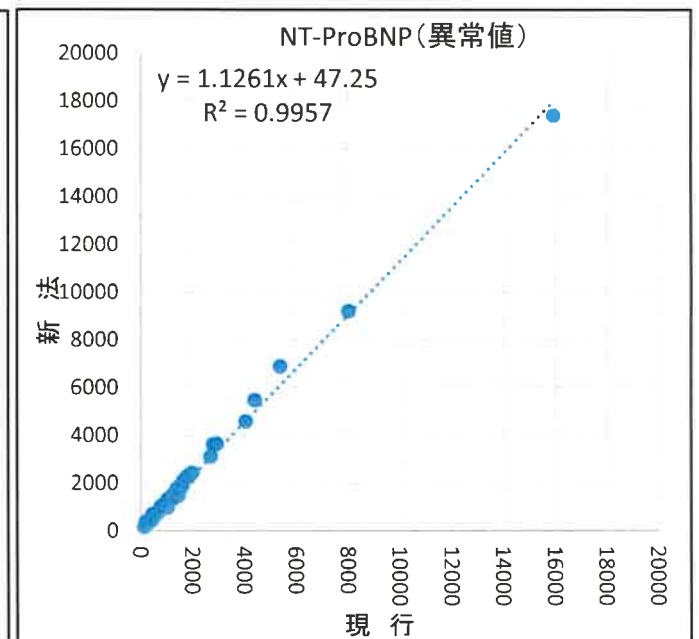

※測定値の比較において新法は現行よりやや高めに出ています。

※相関は低値(基準値以下の測定値)においてはバラツキがありますが、異常値域においては良好な相関を示しています。